



аСКРИН

портативный прибор для скрининга слуха



- Скрининг по методикам ЗВОАЭ и ЭЧПИ
- Легко настраиваемые протоколы обследований
- Мобильный терминал со встроенным термопринтером
- Bluetooth для передачи данных
- Совместим с устройствами на платформе Android

аСкрин



Bluetooth-интерфейс позволяет экспортировать данные на внешний компьютер, на который установлена программа «Нейро-Аудио-Скрин менеджер».



Программа «Нейро-Аудио-Скрин менеджер» поставляется вместе с прибором и позволяет импортировать результаты обследований на компьютер для хранения в единой базе данных.



Помимо мобильного терминала, «аСкрин» может также подключаться ко многим современным смартфонам и планшетах на платформе Android с поддержкой USB On-The-Go и разъемом USB Type-C.

БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ЗА 4 ШАГА:


1 Подготовка к обследованию

Подберите и наденьте вкладыш нужного размера на носик зонда. Введите зонд в слуховой проход пациента.



2 Выбор необходимой методики (ЗВОАЭ/ЭЧПИ)

Проведите обследование слуха с помощью регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) или отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ЭЧПИ). «аСкрин» поставляется с набором шаблонов настроек, которые подходят для большинства условий записи («Шумно — скрининг», «Нормально — скрининг», «Тихо — стандарт»). Чтобы получить достоверные результаты, вы можете использовать готовые шаблоны или создать свои.

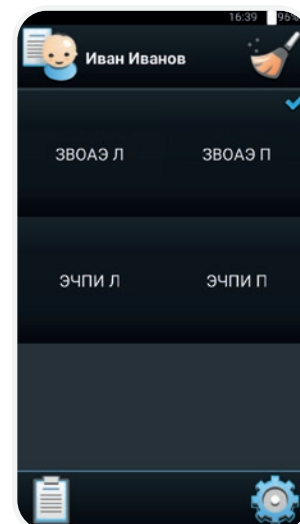

3 Результат через несколько секунд

Высокая производительность и сокращение времени проведения тестов достигаются за счет использования специальных технологий подавления шума и точной калибровки прибора.



4 Мгновенная печать результатов

Результаты тестов можно сразу распечатать на встроенном термопринтере, сохранить в памяти прибора или перенести в компьютерную программу. Вы также можете распечатать результаты обследования на Wi-Fi-принтере, поддерживающем Android, либо на любом принтере через Cloud Print.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛУХА

Нейро-Аудио



НАЗНАЧЕНИЕ

Клинический прибор
для регистрации
СВП и ОАЭ

ДОСТУПНЫЕ ТЕСТЫ

КСВП, ССВП, ДСВП,
ЭКоГ, ВМВП, ASSR,
мульти-ASSR, P300,
MMN, ЗВОАЭ, ЭЧПИ

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система на базе
персонального
компьютера

Аудио-СМАРТ



Диагностический/
скрининговый
импедансометр
и анализатор ОАЭ и КСВП

Тимпанометрия, АР,
распад АР, ФСТ, ЗВОАЭ,
ЭЧПИ, АСВП, КСВП

Автономная
портативная система

аТимп



Импедансометр

Тимпанометрия,
АР, распад АР,
ФСТ, ФСТ-2

Система на базе
мобильного терминала
или персонального
компьютера